

# CLEANASCOPE™ ADVANTAGE

Système de transport et de stockage à court terme

Transport et stockage des endoscopes



a STERIS company

# IDENTIFICATION CLAIRE DES ENDOSCOPES PROPRES FACE À CEUX CONTAMINÉS

**Savoir que c'est propre en un coup d'œil.** Le système de transport et de stockage à court terme CLEANASCOPE™ ADVANTAGE permet de protéger vos endoscopes en minimisant la manipulation directe et en réduisant le contact avec des contaminants présents dans l'air.

La conception établie de longue date crée un environnement protecteur pour chaque endoscope désinfecté. Les revêtements portant un code couleur vert (propre) et rouge (contaminé) permettent d'identifier immédiatement les scopes propres face à ceux contaminés.



## FLUX DE TRAVAIL DES ENDOSCOPES OPTIMISÉ



« Transportez l'endoscope souillé jusqu'à la zone de retraitement dans un contenant fermé résistant aux perforations, ce qui évite d'exposer le personnel, les patients ou l'environnement à des organismes potentiellement infectieux... »

Normes en matière de prévention des infections lors du retraitement des endoscopes gastro-intestinaux flexibles

Society of Gastroenterology Nurses and Associates, Inc. 2018

Les plateaux s'ajustent à l'encastrement sur le dessus du chariot, ce qui en fait une surface de travail idéale

Offre un espace de stockage à court terme fermé pour les scopes retraités

Couvercles rigides disponibles pour une protection supplémentaire lors du transport en dehors du service

Disponible avec 5, 6 et 10 plateaux




Plateau solide et réutilisable qui peut recevoir de gros endoscopes et la cassette ADVANTAGE PLUS™ AER



Le système de revêtement en trois parties, stérile, à usage unique et emballé réduit le risque éventuel de contamination croisée

Grosses roulettes avec frein de blocage pour le transport

Après la procédure, rincer et essuyer l'endoscope avec le détergent INTERCEPT™ et placer l'endoscope souillé dans le plateau. Recouvrir le plateau à l'aide du revêtement rouge pour identifier clairement l'endoscope comme « CONTAMINATED » (CONTAMINÉ).

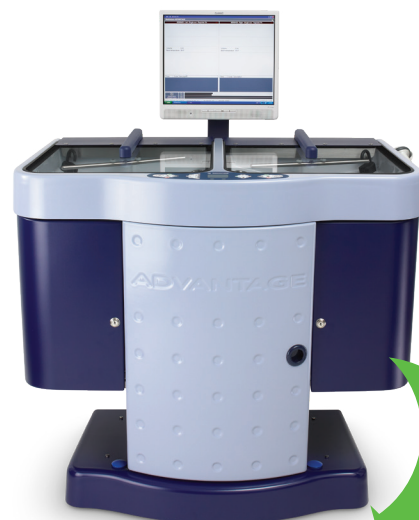

TRANSPORT CONTAMINÉ

NETTOYAGE MANUEL

LA CASSETTE S'AJUSTE EN TOUTE SÉCURITÉ DANS LE RETRAITEUR ADVANTAGE PLUS™



## Informations sur les commandes du système CLEANASCOPE™ ADVANTAGE



CHARIOT CLEANASCOPE™		
RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	DIMENSIONS
103470	Chariot à cinq plateaux (plateaux inclus)	91 H x 64 L x 57 P (cm)
103466	Chariot à six plateaux (plateaux inclus)	106 H x 64 L x 57 P (cm)
103467	Chariot à dix plateaux (plateaux inclus)	164 H x 64 L x 57 P (cm)



### REVÊTEMENTS ET ACCESSOIRES CLEANASCOPE™

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉS PAR BOÎTE
103585	Jeu de revêtements stériles	200 revêtements stériles/boîte
103604	Distributeur (montage mural)	1
103456	Plateau	1
103457	Couvercle de plateau, transparent	1
CAS-1000	Cassette Advantage	1

