

Endoscope série EG/EC-760/740/720 **Test d'étanchéité** FUJIFILM

(à l'exception des endoscopes à ultrasons) www.fujifilm.com

IMPORTANT : Ce guide de référence rapide (GRR) est un **résumé** des étapes nécessaires pour retraiter correctement l'endoscope série EG/EC-760/740/720. Respectez les étapes détaillées décrites dans le **MANUEL DE RETRAITEMENT**.




Pour plus d'informations :
Chapitre 5
► Sections 5.4.3 et 5.4.4

⚠ AVERTISSEMENT : Portez des équipements de protection individuelle appropriés pendant le retraitement. Faute de quoi, le risque d'infection risque d'augmenter.

⚠ N'immergez **PAS** l'endoscope dans de l'eau ou dans toute autre solution s'il échoue au test d'étanchéité.


A. Inspection du testeur d'étanchéité 5.4.3

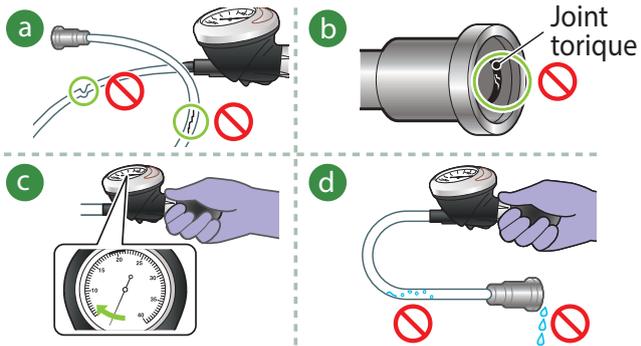

Vérification :

- a** des anomalies présentes sur le tube ;
- b** des anomalies présentes sur le joint torique à l'intérieur du connecteur ;
- c** de l'alimentation en air et du mouvement de l'aiguille de l'indicateur ;
- d** de l'humidité à l'intérieur du tube et qui découle du tube.


B. Fixation du testeur d'étanchéité 5.4.4

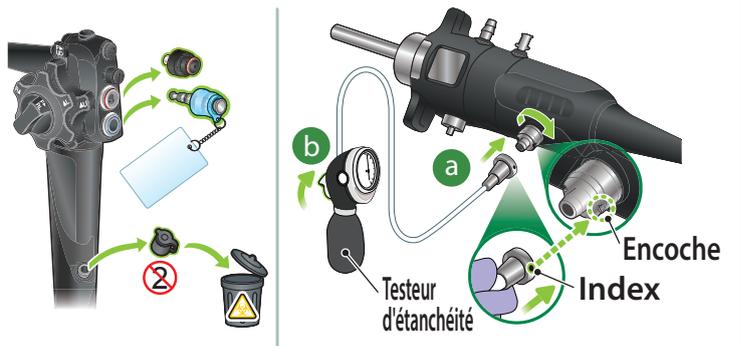

Retirez toutes les parties détachables (si ce n'est pas déjà fait).

- a** Fixez le **testeur d'étanchéité** (au connecteur de ventilation).
- b** Appuyez sur le déclenchement vers le haut.


C. Réalisation d'un test d'étanchéité « à sec » 5.4.4

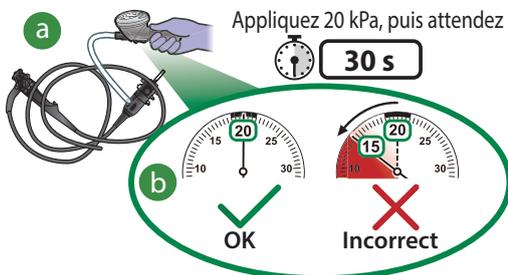

- a** Pressez la poire pour appliquer une pression de **20 kPa**. Attendez **30 secondes**.
- b** Vérifiez l'indicateur d'étanchéité.

⚠ Si la pression est inférieure à **15 kPa**, une fuite d'air est présente.

D. Réalisation d'un test d'étanchéité « mouillé » 5.4.4

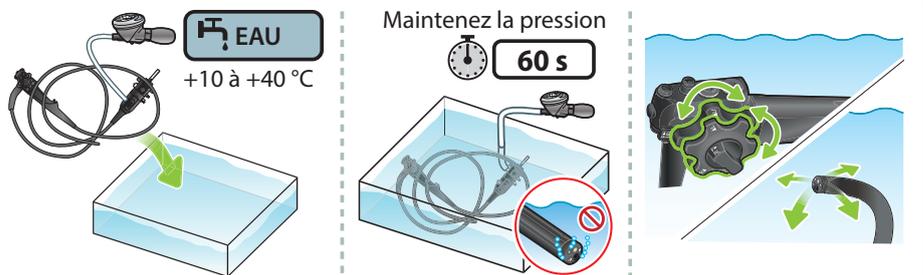


- a** Immergez complètement l'endoscope sous pression dans de l'eau propre et maintenez la pression pour le testeur d'étanchéité mouillé.

- b** Maintenez une pression de **20 kPa** pendant **60 secondes**.

- c** Déplacez l'**élément de coudage** dans toutes les directions.

⚠ Un flux de bulles d'air indique une fuite d'air.

E. Retrait de l'endoscope 5.4.4

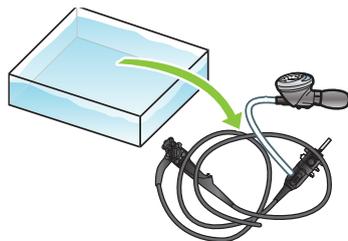


Retirez l'endoscope avec le testeur d'étanchéité fixé, puis placez-le sur une surface plane.

F. Dépose du testeur d'étanchéité 5.4.4






Appuyez sur le déclenchement pour relâcher l'air.

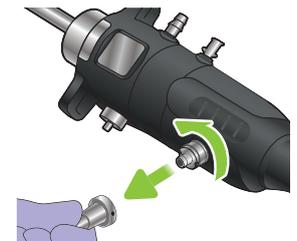

Retirez le **testeur d'étanchéité**.

* Les emplacements détaillés dans le manuel de retraitement sont susceptibles d'évoluer.
fr 897N204104A Version 1 2020-10-30

Réalisation du nettoyage manuel ►

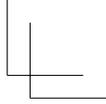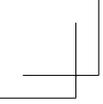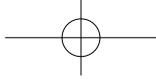

 897N204104A Version 1 2020-10-30

 **FUJIFILM Corporation**
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Japan

